

間接胃エックス線検診車フィルム交換



胃検診 V 車




胃検診 A 車






間接フィルムレサプライマガジン
テープは光漏れ防止

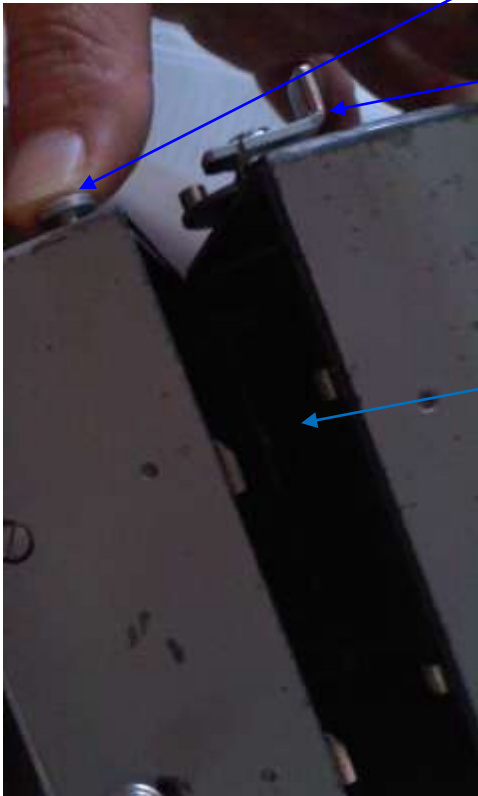

ボタンを押しながらストッパーを解除し
て開きます

止め金具


開きました

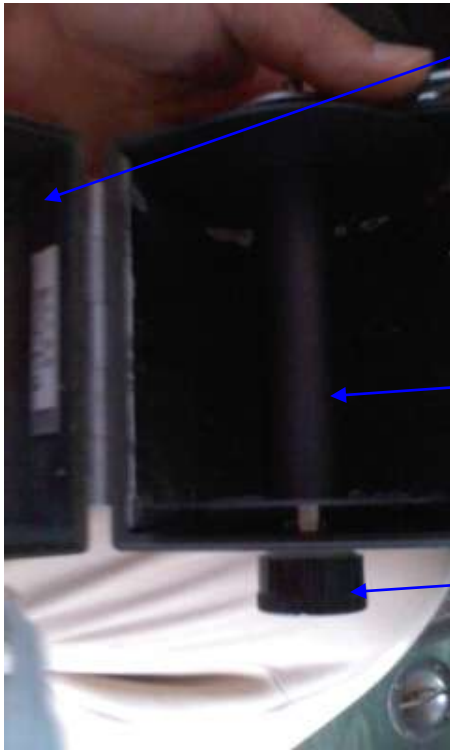

完全に開ききります


スプールコアがあります

スプール固定金具

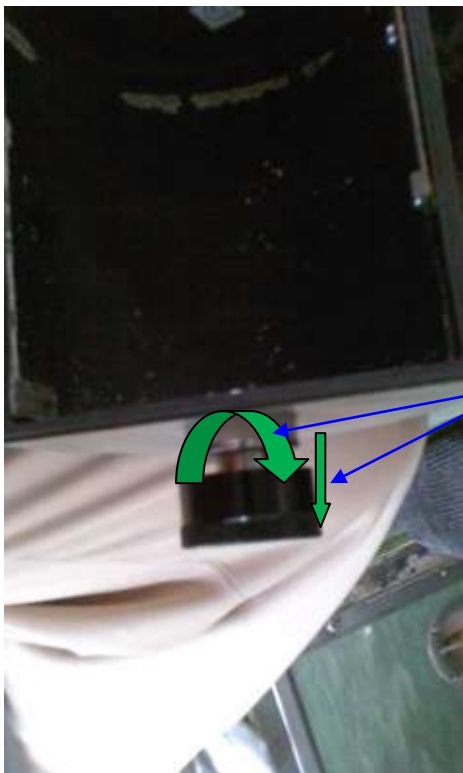

スプール固定金具を引き抜きながら矢印
の方向にねじります

スプールはフリーになり取り出せます

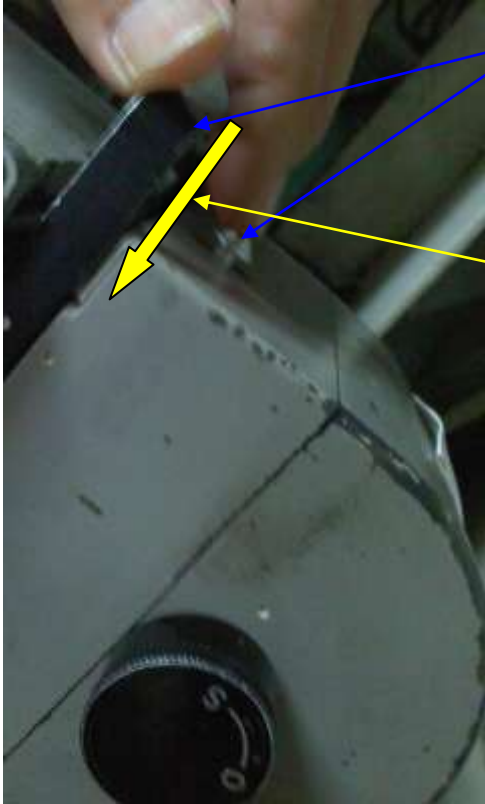

レシーブマガジンはボタンを押しながら
フィルムカットレバーを押し込んでセット
します

矢印の方向でセット



押し込み確認



フィルム送りボタン
胸部は10回コマ送り
UGIは5回コマ送り



カブリ防止テープは近くに邪魔にならないように張って準備しておきます

撮影カメラケース開閉ボタン



中心部を押しながら回旋してロックを解除
します
蓋が開きます



フィルムが見えています。カブリました
5回フィルム送りがが必要です

蓋はしっかり開けます



フィルムを缶から出してセットします
明室作業です
順目方向にセットします
間違えることはないでしょうが間違えると最悪の事態を招きます




撮影カメラケースにフィルムを通して行きます

ボタンを押すとフィルム送り通路が空きます (2mmぐらい) 底にフィルムを通しつつ

フィルムカウンタブネを押し込みます
V車は見えないので押し込み作業は不要
A車はお仕込み作業は必要

**フィルムは両サイドのサポートレールに
しっかり通す (最も重要)**

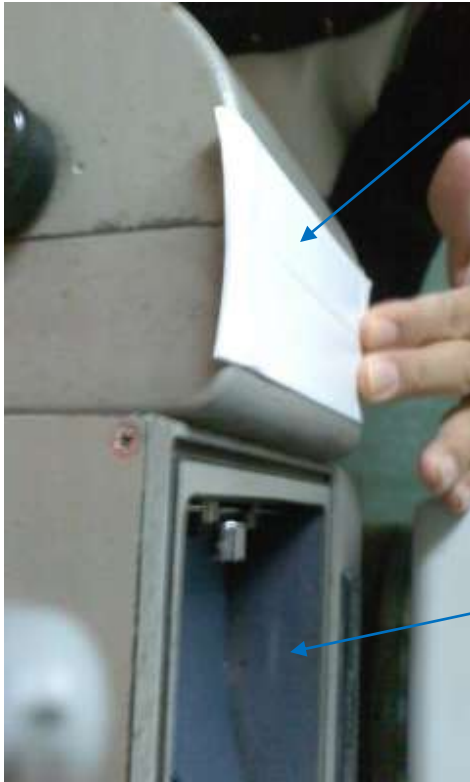

サブライマガジンはテープでこのように遮光します

フィルムガイド紙



生フィルムがわずかに見えるところまでフィルム送りボタンを押して送ります



レシーブマガジン側にフィルムガイド紙を通します
でてきたのを確認したら
撮影カメラケースを閉じて誤って開かないようにテープで固定します

生フィルムがコアに十分巻きとれるまで送りボタンを押します
フィルムコア中心部に溝があります
3センチほどさし込み折り目を入れて硬く
順目方向に巻きとっていきます


撮影カウンター
撮影枚数セット
フィルム使用量530コマぐらいは十分撮影可能






書類整理 巻きナンバー

問診票

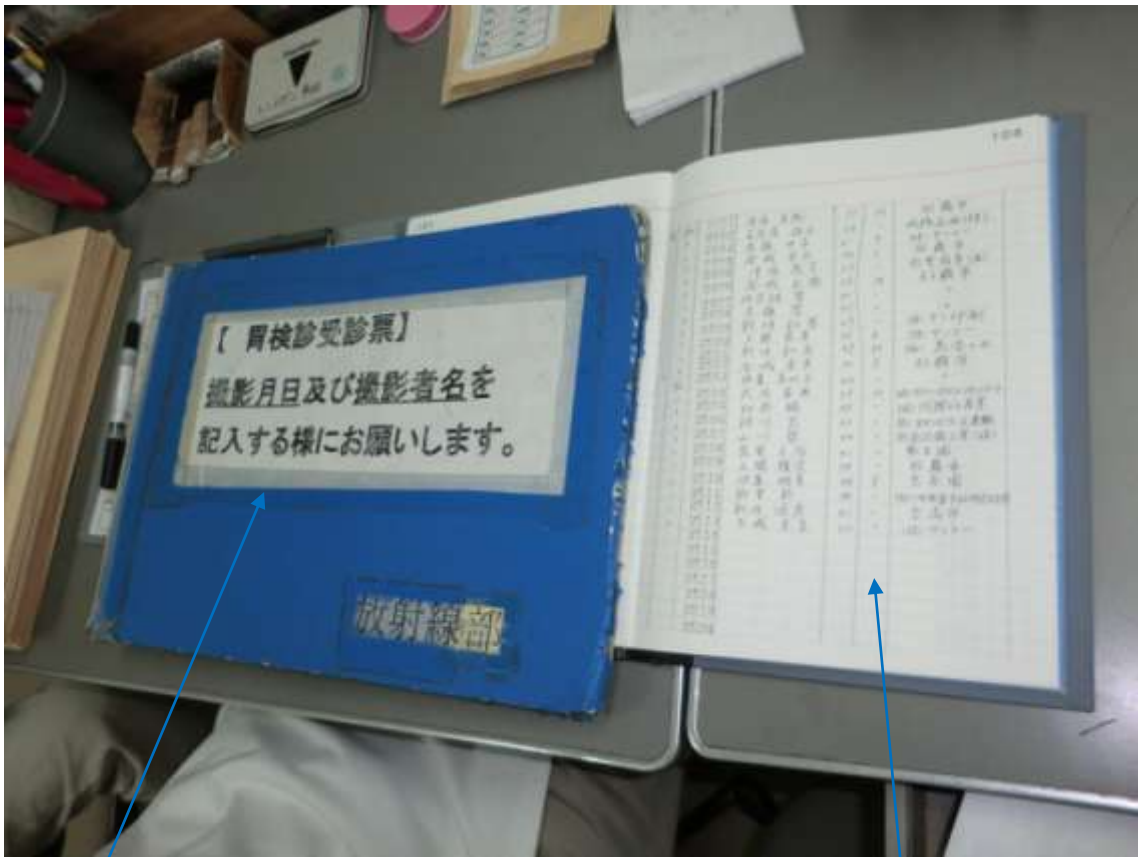

受診票帳簿に検診場所と撮影者：助手を記入

胃健診簿にも記入

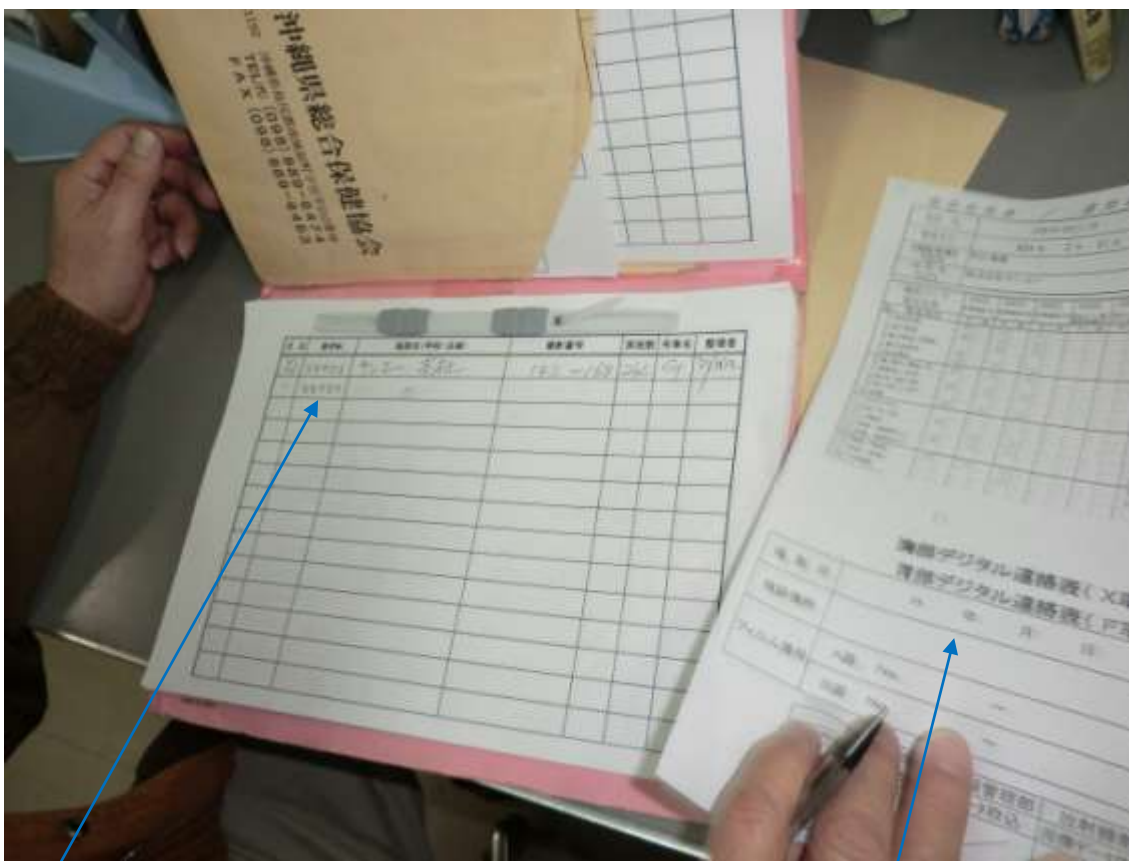


デジタルの場合巻きナンバーをこの台帳にカウント

健康デジタル連絡票にDVD連絡票を添えて

提出

封筒は鉛筆で小さく薄く詳細記入して所定の場所に入れる

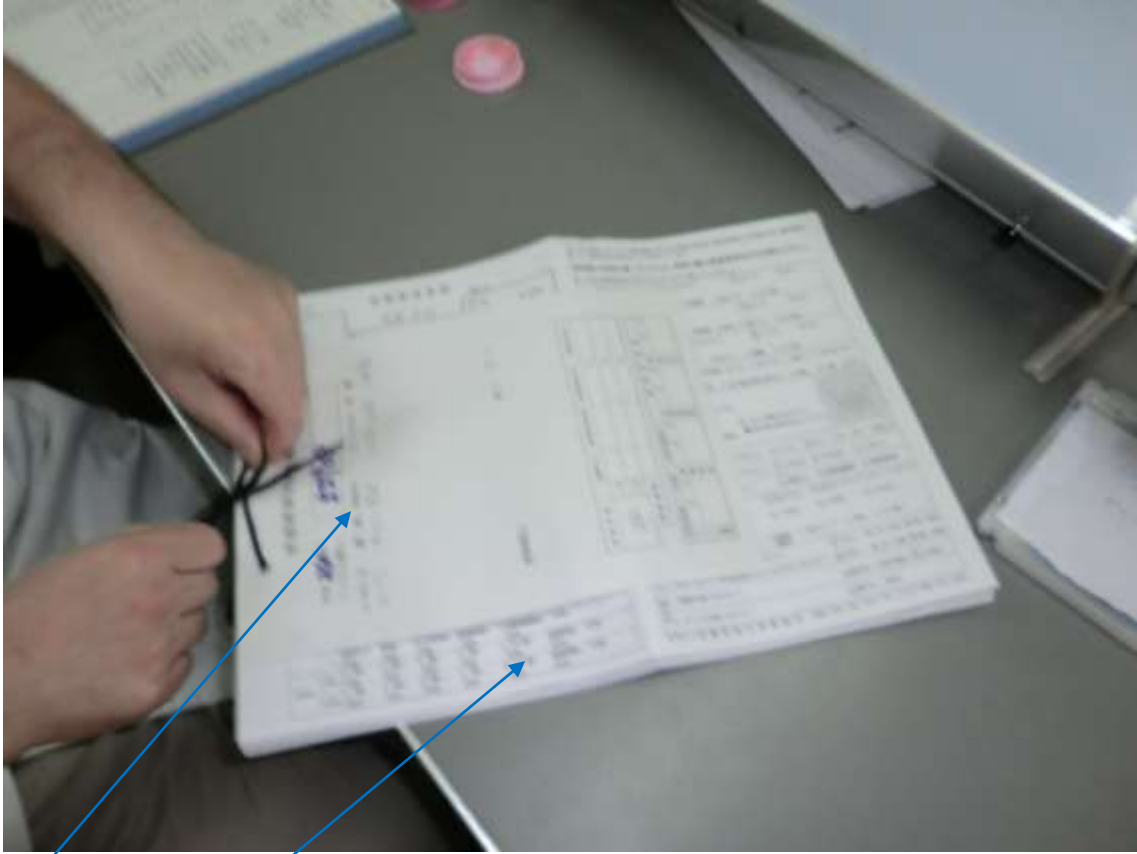

問診票と読影依頼用紙（巻きナンバーは24年度紫で記入）綴って所定の場所に

問診票



フィルムの場合この台帳に記入